

Anleitung
Armband- und Umhängesender
R/5006.2



Stand: 22.02.2022

Inhalt


Wichtig zu beachten	4
Lieferumfang	4
Senderaufbau	5
Batteriewechsel	6
Batterie entfernen	6
Batterie einsetzen	7
Bedienung	8
Einschalten	8
Ausschalten	8
Ruf Auslösen *	9
Notruf Auslösen *	9
Ruf Quittieren *	9
Zubehör & Ersatzteile	10
Kontakt	11

Wichtig zu beachten


Für die korrekte Funktion des Senders, verwenden Sie ausschliesslich Batterietypen (muRata CR2032R), welche vom Hersteller Gets MSS SA empfohlen werden. Bei anderen Batterien kann eine Fehlfunktion oder eine verkürzte Batterielaufzeit nicht ausgeschlossen werden!

Lieferumfang

Der Sender wird mit folgendem Zubehör geliefert.

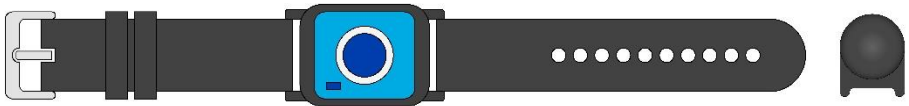


In der Packung befindet sich nebst dem Sender mit montiertem Armband auch ein Werkzeug, um den Batteriedeckel zu entfernen.

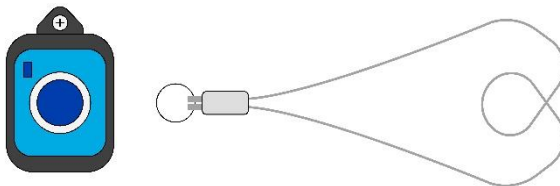

In der Packung befindet sich nebst dem Sender mit montiertem Clip auch ein Werkzeug, um den Batteriedeckel zu entfernen.

Senderaufbau

Der Sender hat folgende Schnittstellen, um seinen Status anzuzeigen bzw. Befehle zu empfangen.

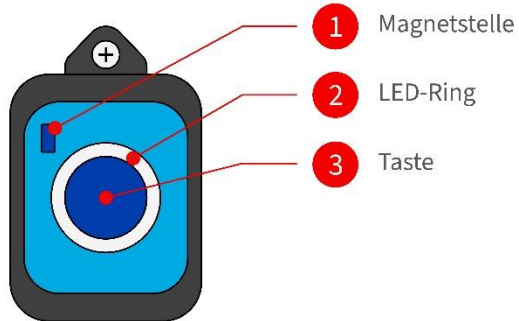

Batteriewechsel


Der Funksender verwendet für den Betrieb eine Knopfzellenbatterie vom Typ CR 2032R. Tauschen Sie die Batterie nach einem Jahr oder wenn der Sender einen Batteriealarm auslöst.

Wichtig

Verwenden Sie ausschliesslich Batterien vom Typ CR2032R des Herstellers muRata. Bei Verwendung anderer Batterien sind Fehlfunktionen nicht auszuschliessen!

Batterie entfernen

Um die Batterie im Sender zu ersetzen, entfernen Sie als erstes den Batteriedeckel auf der Rückseite des Senders. Dazu stecken Sie das mitgelieferte Batteriewerkzeug in die Einsparungen im Deckel und drehen den Deckel gegen den Uhrzeigersinn.

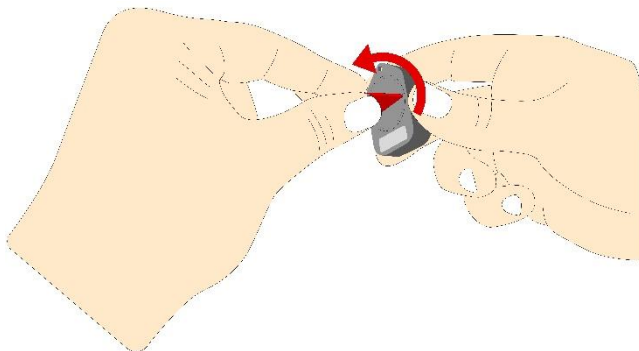


Batterie einsetzen

Vor dem Einsetzen der Batterie prüfen Sie stets, ob der Dichtungsring im Gehäuse vorhanden ist und dass dieser keine Beschädigungen aufweist.



Setzen Sie den Batteriedeckel mit der Batterie auf das Batteriewerkzeug. Anschliessend setzen Sie den Deckel, wie auf dem nachfolgenden Bild gezeigt, in den Sender ein und verschliessen diesen mit einer Drehung im Uhrzeigersinn.

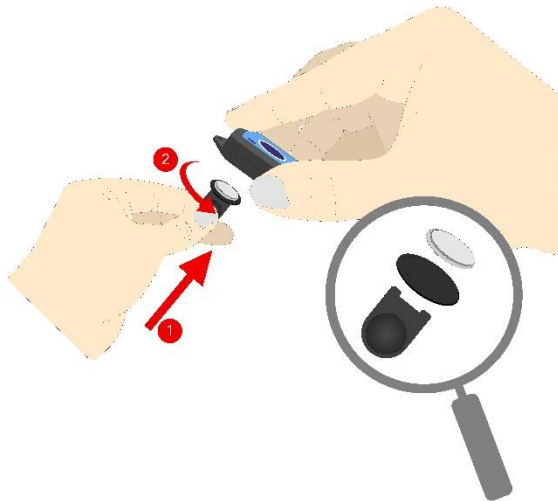

Bedienung

Punkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, können ggf. abweichen, falls Sie eine Kundenspezifische Programmierung verwenden. Erkundigen Sie sich dafür bei Ihrem Technischen Dienst.

Einschalten

Um den Sender einzuschalten, drücken Sie die Taste (3) insgesamt drei Mal kurz (innert 1 Sekunde). Dabei leuchtet der LED-Ring (2) beim ersten Druck weiss auf. War dieser Vorgang erfolgreich blinkt der LED-Ring mehrmals violett auf.

Hinweis

Nach einem erfolglosen Versuch, hat der Sender eine Sperrzeit von ca. 20 Sekunden. In dieser Sperrzeit leuchtet der LED-Ring beim ersten Druck nicht weiss auf.

Ausschalten

Um den Sender auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste (3) gedrückt. Der LED-Ring (2) beginnt rot zu blinken. Nach einiger Zeit leuchtet der LED-Ring konstant rot auf. Halten Sie jetzt den Magneten an die Magnetzone (1) während Sie die Taste immer noch gedrückt halten. Der LED-Ring leuchtet zuerst violett und anschliessend blau auf. Jetzt können Sie den Magneten entfernen, sowie die Taste wieder loslassen.

Hinweis

Beenden Sie vor dem Ausschalten alle Rufe des Senders. Da diese sonst weiter auf dem System anstehend bleiben.

Tipp

Um zu prüfen, ob der Sender erfolgreich ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste. Wenn der LED-Ring weiss aufleuchtet, ist der Sender ausgeschaltet.

Ruf Auslösen *

Um einen Ruf auszulösen, betätigen Sie die Taste (3) einmal. Nach dem Drücken leuchtet der LED-Ring (2) kurz grün auf. Damit wird bestätigt, dass der Ruf erfolgreich gesendet wurde. Wenn der Ruf nicht an das System übermittelt worden ist, so leuchtet der LED-Ring rot statt grün auf.

Notruf Auslösen *

Um einen Notruf auszulösen, drücken Sie die Taste (3) dreimal schnell hintereinander. Nach dem Drücken leuchtet der LED-Ring (2) kurz grün auf. Damit wird bestätigt, dass der Ruf erfolgreich gesendet wurde. Wenn der Ruf nicht an das System übermittelt worden ist, so leuchtet der LED-Ring rot statt grün auf.

Ruf Quittieren *

Um einen aktiven Ruf zu beenden, halten Sie den Magneten an die Magnetstelle (1). Jetzt leuchtet der LED-Ring (2) blau auf, halten Sie den Magneten weiter an die Magnetstelle, bis der LED-Ring grün aufleuchtet.

Sollte der LED-Ring rot aufleuchten, hat die Übermittlung der Quittierung nicht funktioniert. Bitte versuchen Sie es erneut.

Hinweis

Um einen Weglaufruf zu quittieren, verlassen Sie zuvor die Weglaufzone mit dem Sender, da dieser sonst gleich einen neuen Weglaufruf auslösen wird.

Zubehör & Ersatzteile

Viele Teile des Senders können ersetzt werden oder durch optionales Zubehör Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Art	Beschreibung	Preis <small>Exkl. MwSt.</small>
105214-E	Batterie muRata CR 2032R	2.28
104727	Werkzeug zur Demontage des Armbandes	18.00
104900	Dichtung bei Batteriedeckel (10er Pack)	11.00
104959	Armband schwarz komplett	11.00
105196-E	Schlaufe für das Armband (10er Pack)	11.00
21-9131201	Lederarmband (öffnet sich nur mit Spezialschlüssel)	69.00
21-9131014	Spezialschlüssel für Lederarmband	96.00

Preise sind in Schweizer Franken und ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Preisänderungen und Fehler vorbehalten. Stand: 8.2.2022

Kontakt

Bei Fragen zu diesem Gerät kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Rufcom GmbH
Industrieweg 32
4852 Rothrist

E-Mail: info@rufcom.ch
Telefon: 062 752 85 15
24h-Pikett: 062 752 85 18 *

* Kostenpflichtig



Digitale Anleitung

www.rufcom.ch/anleitung/r5006

rufcom⁷⁷
Rufanlagen | Funksysteme

Rufcom GmbH
Industrieweg 32
4852 Rothrist

Web: www.rufcom.ch
E-Mail: info@rufcom.ch
Telefon: 062 752 85 15
24h-Pikett: 062 752 85 18 (kostenpflichtig)