


Anleitung **Bedscan**



Installation

Installieren Sie den Sensor mittig am Fussende des Bettes. Achten Sie darauf, dass der Sensor gerade ausgerichtet ist. Er darf nicht zu einer Seite hingeneigt sein oder verdreht zum Patienten montiert werden.

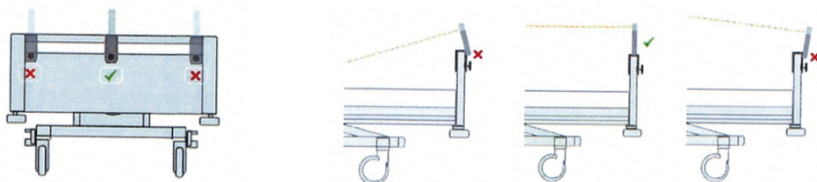

Einschalten

Um das Gerät einzuschalten betätigen Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden.




Beim Einschalten überprüft der Sensor automatisch die korrekte Montage. Falls diese nicht korrekt sein sollte gibt der Sensor akustische sowie optische Signale.



Hinweis

Schalten Sie den Sensor erst ein, wenn er definitiv am Bett montiert ist.

Wahl des Programms

Der Bedscan kann verschiedene Situationen abdecken. Dazu hat er sechs Programme die verschiedene Ansprechverhalten haben. Um in die Einstellung der Programme zu gelangen, drücken Sie 3 Sekunden lang die  &  Tasten gleichzeitig. Nach dem ertönen des Akustischen Signals, können Sie mittels der Pfeiltasten das entsprechende Programm auswählen. Um die Einstellung zu speichern drücken Sie im Anschluss die  Taste.

Falls die OK Taste nicht am Ende gedrückt wird, bleibt das vorherige Programm aktiv.

Programme

1 Aufrichten im Bett

(Verwenden Sie diese Option nicht, wenn das Kopfende des Bettes nach oben ausgerichtet ist.)

2 Sitzend am Bettrand

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Person sich an den Bettrand setzt.

3 Bett wird verlassen

Der Alarm wird beim Verlassen des Bettes ausgelöst.

4 Nicht zurückkehrt nach 5 Minuten

Wenn die Person nach dem Verlassen des Bettes nicht innerhalb von 5 Minuten wieder zurückkehrt (Schlafposition im Bett), wird Alarm ausgelöst.


5 Nicht zurückkehrt nach 10 Minuten

Wenn die Person nach dem Verlassen des Bettes nicht innerhalb von 10 Minuten wieder zurückkehrt (Schlafposition im Bett), wird Alarm ausgelöst.

6 Nicht zurückkehrt nach 15 Minuten

Wenn die Person nach dem Verlassen des Bettes nicht innerhalb von 15 Minuten wieder zurückkehrt (Schlafposition im Bett), wird Alarm ausgelöst.

Ausschalten

Um den Sensor auszuschalten drücken Sie für 3 Sekunden die  Taste. Wenn der Vorgang erfolgreich war leuchten alle LEDs auf und gehen nacheinander aus.



Hinweis

Schalten Sie den Sensor nach jedem Alarm oder wenn Sie den Patienten pflegen aus! Wird der Sensor nicht ausgeschaltet nach einem Alarm, wird der Alarm immer wieder wiederholt.

Batteriewechsel

Der Bedscan hat zwei Batterien enthalten. Um diese zu wechseln entfernen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite des Senders. Danach können Sie den Bedscan vom Befestigungswinkel entfernen. Im inneren finden Sie eine Plastikflasche, an dieser können Sie die Batterie sowie den Funksender herausziehen.

Die grosse Batterie ist für den Bedscan selbst. Im nachfolgenden Teil ist eine graue Box deren Deckel mit zwei Schrauben gesichert ist. Nach dem Entfernen des Deckels sehen Sie den darin enthaltene Funksender. Dieser variiert je nach Funksystem welches Sie verwenden. Jeder Sender hat ebenfalls eine Batterie enthalten. Welche Batterie Sie benötigen entnehmen Sie der Batterieliste.



Batterieliste

Bedscan Sensor	LSH20
Funksender für Gets Funksystem	CR2032
Funksender für TeleAlarm (LE10 / Mainunit)	CR2032
Funksender für STT Empfänger	CR2450
Funksender für Eldat Empfänger	CR2032

rufcom 
Rufanlagen | Funksysteme

Telefon: +41 (0) 62 752 85 15

Pikett: +41 (0) 62 752 85 18

www.rufcom.ch

info@rufcom.ch